


## Bruksanvisning

Trulicity 4,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld penna  
dulaglutid

BRYT  
FÖRSEGLINGEN

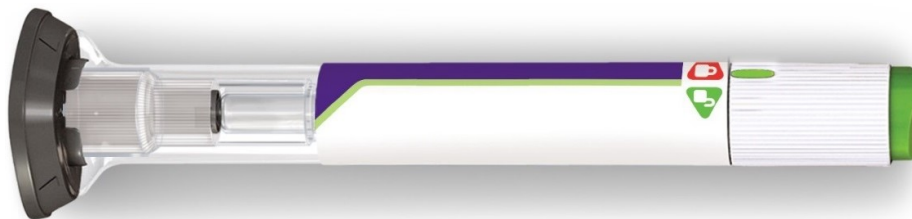

BRYT  
FÖRSEGLINGEN

← Veckla ut helt →



Läs båda sidor för fullständiga anvisningar

### INFORMATION OM TRULICITY FÖRFYLLED PENNA

Läs igenom hela denna bruksanvisning och bipacksedeln noga innan du använder den förfyllda pennan. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om hur man injicerar Trulicity på rätt sätt.


- Pennan är ett förfyllt injektionshjälpmedel som är klart att använda och avsett för engångsbruk. Varje penna innehåller en veckodos av Trulicity (4,5 mg). Varje penna innehåller endast en dos.
- **Trulicity administreras en gång per vecka.** Det kan vara bra att markera dagarna i din almanacka för att komma ihåg när det är dags för nästa dos.
- När du trycker på den gröna injektionsknappen för pennan automatiskt in nålen i din hud, injicerar läkemedlet och drar sedan tillbaka nålen **när injektionen är klar**.

## INNAN DU BÖRJAR

| Ta ut                                                                      | Kontrollera                                                                     | Inspektera                                                                                                                 | Förbered                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ur kylskåpet.<br><br>Lämna bottenlocket på tills det är dags att injicera. | på etiketten att du har rätt läkemedel och att utgångsdatum inte har passerats. | pennan. Använd inte läkemedlet om pennan är skadad eller om läkemedlet är grumligt, missfärgat eller innehåller partiklar. | dig genom att tvätta händerna. |

## VÄLJ INJEKTIONSSTÄLLE


- Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan kan hjälpa dig att välja det injektionsställe som passar dig bäst.
- Du kan injicera läkemedlet i buken eller i låret.
- Om en annan person ger dig injektionen kan du få den i överarmen.
- Byt injektionsställe varje vecka. Du kan använda samma område på kroppen men tänk på att välja ett nytt injektionsställe inom det området.

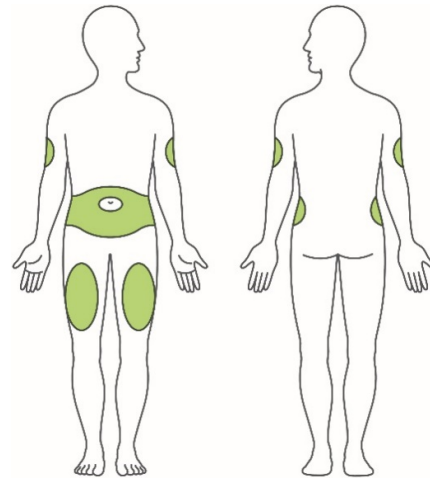

FRAM

BAK

1. TA AV LOCKET
2. PLACERA OCH LÅS UPP
3. TRYCK IN OCH HÅLL KVAR

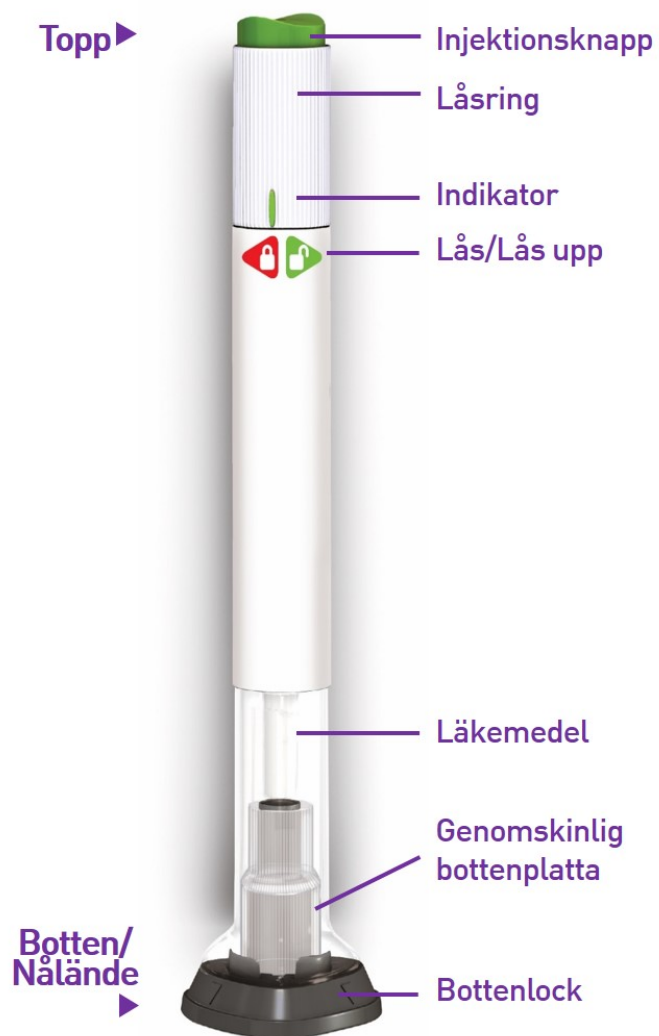


## 1 TA AV LOCKET

-  Kontrollera att pennan är **låst**.
- Dra av det grå bottenlocket.

**Sätt inte tillbaka bottenlocket – det kan skada nålen. Rör inte nålen.**

- När det grå bottenlocket tagits bort och ser ut som på bilden, kan det kastas.

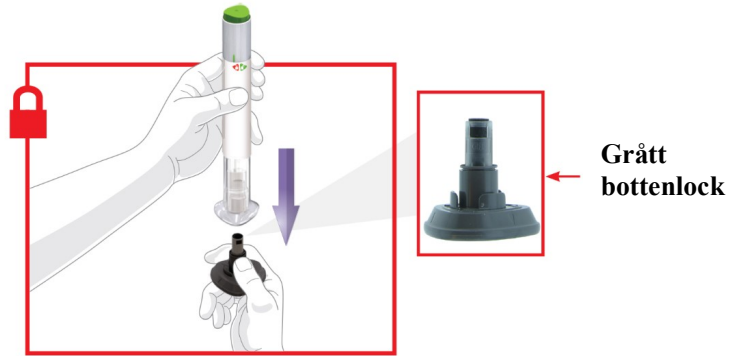


Om det gråa bottenlocket inte ser ut som på bilden ovan:

- **Använd inte** pennan.
- Spara pennan och bottenlocket på ett säkert ställe och kontakta Lilly.
- Använd en ny penna.

## 2 PLACERA OCH LÅS UPP


- Placera den genomskinliga bottenplattan plant och med ett bestämt tryck mot din hud på injektionsstället.

-  **Lås upp** genom att vrida på låsringen.

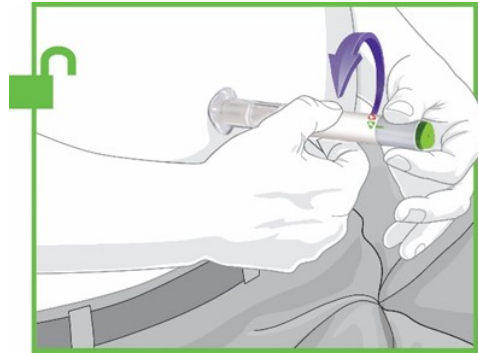

## 3 TRYCK IN OCH HÅLL KVAR

- Tryck in och håll kvar den gröna injektionsknappen. Du hör ett ljudligt klick.
-  Håll kvar den genomskinliga bottenplattan med ett bestämt tryck mot huden tills du hör ett andra klick. Detta sker när nålen börjar gå tillbaka efter cirka 5–10 sekunder.
- Ta bort pennan från huden.

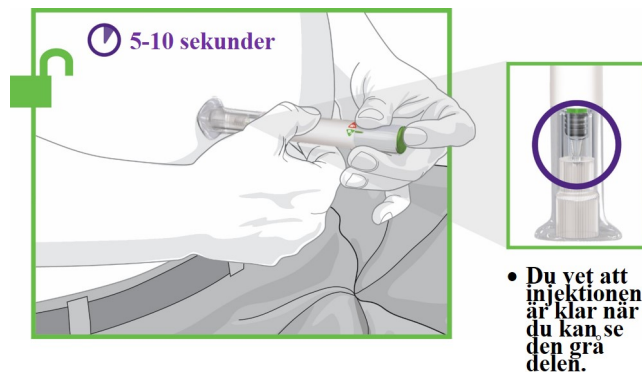

- **Du vet att injektionen är klar när du kan se den grå delen.**

## VIKTIG INFORMATION

Förvaring och hantering

Kasta pennan

Vanliga frågor

Övrig information

Om du vill ha mer information

## FÖRVARING OCH HANTERING

- Pennan innehåller delar av glas. Hantera den varsamt. Använd inte pennan om du har tappat den på en hård yta. Ta en ny penna till injektionen.
- Förvara pennan i kylskåp.
- Om du inte har tillgång till kylskåp kan du förvara pennan i rumstemperatur (under 30 °C) i högst 14 dagar.
- Pennan får inte frysas. Om pennan har varit fryst ska den INTE ANVÄNDAS.
- Förvara pennan i originalförpackningen för att skydda det mot ljus.
- Förvara pennan utom syn- och räckhåll för barn.
- Fullständig information om korrekt förvaring finns i bipacksedeln.

## KASTA PENNAN

- Pennan ska kastas i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar.
- Behållaren för vassa föremål ska inte återvinnas.
- Fråga läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan hur man kastar läkemedel som inte längre används.



## VANLIGA FRÅGOR

### Vad ska jag göra om jag ser en luftbubbla i pennan?

Luftbubblor är normalt. De kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

### Vad händer om jag låser upp pennan och trycker på den gröna injektionsknappen innan jag har tagit bort bottenlocket?

Ta inte bort bottenlocket och använd inte pennan. Kasta pennan enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Injicera din dos med en annan penna.

### Vad händer om det finns en vätskedroppe på nålspetsen när jag tar bort bottenlocket?

En vätskedroppe på nålspetsen är inget ovanligt och det påverkar inte din dos.

**Måste jag hålla injektionsknappen intryckt ända tills injektionen är klar?**

Det behövs inte, men det kan göra det lättare för dig att hålla pennan stadigt och bestämt mot huden.

**Jag hörde mer än två klick när jag tog injektionen – två höga klick och ett lite lägre. Fick jag hela injektionen?**

En del patienter kan höra ett lite tystare klick strax före det andra höga klicket. Det hör till pennans normala funktion. Ta inte bort pennan från huden förrän du hör det andra, högre klicket.

**Vad händer om jag har en droppe vätska eller blod på huden efter injektionen?**

Detta är inget ovanligt och det påverkar inte din dos.

**Jag är inte säker på att pennan fungerade som den skulle.**

Kontrollera om du har fått din dos. Dosen har avgetts korrekt om det grå området är synligt (se steg 3). Kontakta även det lokala Lilly-kontor som nämns i bipacksedeln för att få ytterligare instruktioner. Förvara pennan säkert under tiden för att undvika oavsiktliga stickskador.

**ÖVRIG INFORMATION**

- Om du har problem med synen ska du INTE ANVÄNDA pennan utan hjälp från någon som har fått utbildning i hur man använder Trulicity-pennan.

**OM DU VILL HA MER INFORMATION**

- Om du har frågor eller problem med din Trulicity-penna, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.



**SKANNA DENNA KOD FÖR ATT STARTA**  
**[www.trulicity.eu](http://www.trulicity.eu)**