

Bruksanvisning

Mounjaro 2,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
Mounjaro 5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
Mounjaro 7,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
Mounjaro 10 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
Mounjaro 12,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
Mounjaro 15 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
tirzepatid




Viktig information att känna till innan du injicerar Mounjaro.

Läs denna bruksanvisning och bipacksedeln innan du använder Mounjaro förfylld injektionspenna (penna) och varje gång du får en ny injektionspenna. Det kan finnas ny information. Den här informationen ersätter inte samtal med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om ditt medicinska tillstånd eller din behandling.

Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om hur du injicerar Mounjaro på rätt sätt.

- Mounjaro är en förfylld injektionspenna med en engångsdos.
- Injektionspennan har en dold nål som automatiskt förs in i huden när du trycker på injektionsknappen. Injektionspennan drar tillbaka nålen när injektionen är klar.
- Mounjaro används 1 gång i veckan.
- Injicera endast under huden (subkutan).
- Du eller en någon annan kan injicera i magen (buken), övre delen av benet (låret) eller överarmen.
- Du kan behöva ta hjälp av någon annan om du vill injicera i överarmen.

Injektionspennans delar

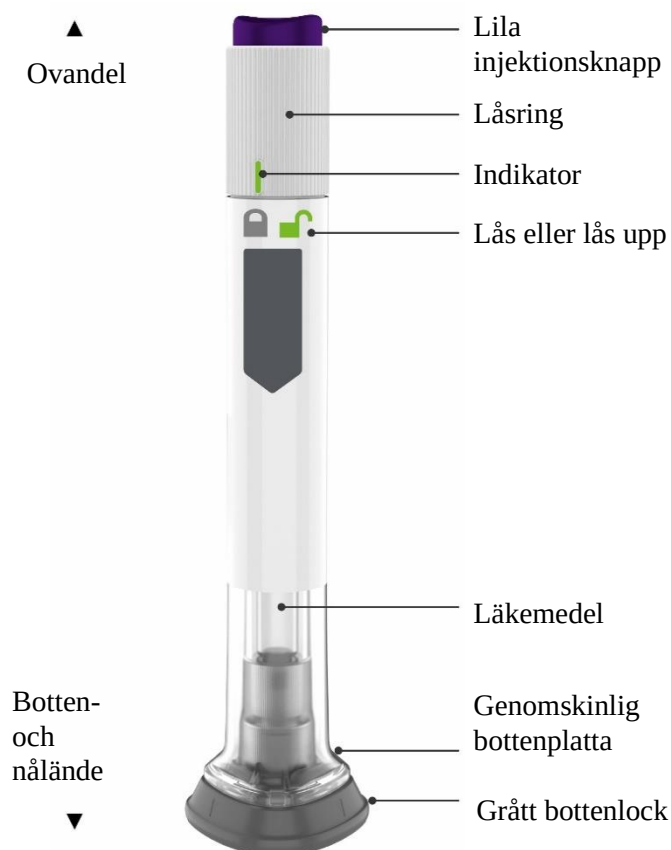

Förbereda injektionen med Mounjaro

Ta ut injektionspennan ur kylskåpet.

Låt det grå bottenlocket sitta kvar tills du är redo att injicera.

Kontrollera etiketten på injektionspennan för att säkerställa att du har rätt läkemedel, dos och att förfallodatum inte har passerats.

Inspektera injektionspennan för att säkerställa att den inte är skadad.

Förfallodatum




Kontrollera att läkemedlet:

- inte är fryst
- är färglös till lätt gult
- inte är grumligt
- inte innehåller partiklar


Tvätta händerna.

Välj injektionsställe

Läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen kan hjälpa dig att välja det injektionsställe som passar dig bäst.

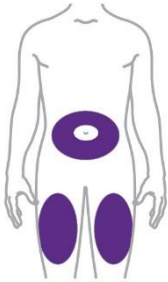

Du eller någon annan kan injicera läkemedlet i magen (bucen) minst 5 cm ifrån naveln eller i låret.

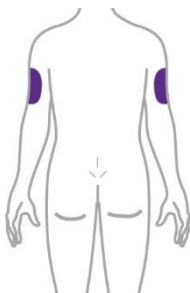

En annan person ska ge dig injektionen om den ska ges på överarmens baksida.


Byt (rotera) injektionsställe varje vecka.

Du kan använda samma område på kroppen men tänk på att välja ett nytt injektionsställe inom det området.

Steg 1 Dra av det grå bottenlocket

Kontrollera att injektionspennan är **låst**.

Lås **inte** upp injektionspennan förrän du har placerat den genomskinliga bottenplattan på huden och är redo att injicera.

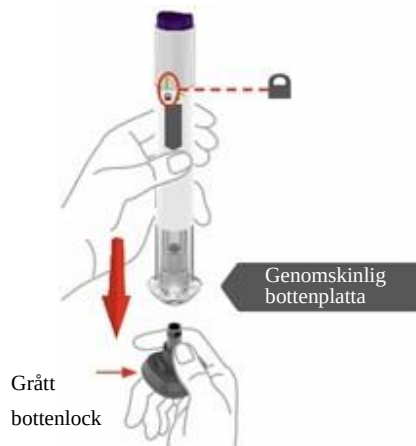

Dra det grå bottenlocket rakt av och kasta det.

Sätt **inte** tillbaka det grå bottenlocket – det kan skada nålen.


Rör **inte** vid nålen.

Steg 2 Placera den genomskinliga bottenplattan på huden och lås sedan upp



Placera den genomskinliga bottenplattan plant mot huden på injektionsstället.

Lås upp genom att vrida på låsringen.

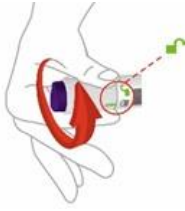

Steg 3 Tryck in och håll kvar i upp till 10 sekunder



Tryck in och håll kvar den lila injektionsknappen.

Lyssna efter:

- Första klicket = injektionen har påbörjats
- Andra klicket = injektionen har avslutats



Du vet att injektionen är klar när du ser den grå kolven.

Efter injektionen ska du placera den använda injektionspennan i en behållare för vassa föremål.

Kasta den använda injektionspennan

- Injektionspennan ska kastas i en behållare för vassa föremål eller enligt läkarens, sjuksköterskans eller apotekspersonalens anvisningar. Injektionspennor ska **inte** kastas bland hushållsavfall.

- Behållaren för vassa föremål ska inte återvinnas.

- Fråga läkaren, sjuksköterskan eller apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.



Förvaring och hantering

- Förvaringsanvisningar finns i avsnitt 5 i bipacksedeln.
- Injektionspennan innehåller delar av glas. Hantera den varsamt. Använd **inte** injektionspennan om du har tappat den på en hård yta. Använd en ny penna till injektionen.

Vanliga frågor

Vad ska jag göra om jag ser luftbubblor i injektionspennan?

Luftbubblor är normalt.

Vad händer om injektionspennan inte är rumstempererad?

Injektionspennan behöver inte värmas upp till rumstemperatur.

Vad händer om jag låser upp injektionspennan och trycker på den lila injektionsknappen innan jag har tagit bort bottenlocket?

Ta **inte** bort det grå bottenlocket. Kasta injektionspennan och ta en ny.

Vad ska jag göra om jag ser en vätskedroppe på nålens spets när jag tar bort det grå bottenlocket?

En vätskedroppe på nålspetsen är normalt. Rör **inte** vid nålen.

Måste jag hålla injektionsknappen intryckt ända tills injektionen är klar?

Det behövs inte, men det kan göra det lättare för dig att hålla injektionspennan stadigt mot huden.

Jag hörde fler än 2 klick under injektionen – 2 höga klick och 1 lite lägre. Fick jag hela injektionen?

Ibland kan man höra ett lite lägre klick strax före det andra höga klicket. Det hör till injektionspennans normala funktion. Ta **inte** bort injektionspennan från huden förrän du hör det andra, högre klicket.

Jag är inte säker på om injektionspennan fungerade som den skulle.



Kontrollera om du har fått din dos. Din dos har avgetts på rätt sätt om den grå kolven är synlig. Se även **steg 3** i anvisningarna.

Om du inte ser den grå kolven kontaktar du Lilly för att få ytterligare instruktioner. Förvara injektionspennan säkert under tiden för att undvika oavsiktliga stickskador.

Vad händer om jag har en droppe vätska eller blod på huden efter injektionen?

Detta är normalt. Tryck en bomullstuss eller en kompress mot injektionsstället. Gnugga **inte** på injektionsstället.

Övrig information

- Om du har problem med synen ska du **inte** använda injektionspennan utan hjälp från någon som har fått utbildning i hur man använder Mounjaro-pennan.

Om du vill ha mer information

- Om du har frågor eller problem med din Mounjaro-penna, kontakta Lilly eller läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Ändrades senast 01 september 2024